

Ringdosimeter från Landauer - rengöring

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Bakgrund](#)
[Ansvar](#)

[Genomförande](#)
[Relaterande rutiner](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Att beskriva rengöring och desinfektion av ringdosimeter från Landauer för mätning av stråldos till händer på vårdpersonal vid användning i steril miljö.

Bakgrund

Ringdosimeter används för att undersöka den faktiska stråldosbelastningen på vårdpersonalens händer och fingrar som sedan jämförs med stråldosgränser och strålningsrelaterade risker.

Ansvar

Medarbetare som bär ringdosimeter ska följa denna rutin och ansvarar för att hålla reda på sina dosimetrar under hela mätperioden.

Genomförande

Ringdosimetern ska bäras på samma finger varje gång med etiketten vänd utåt om inget annat är överenskommet, se bild.

Inför användning

1. Desinficera händerna med handdesinfektion.
2. Ta fram ringdosimeter och desinficera noggrant under 1,5 minuter med DAX Ytinfektion Plus (isopropylalkohol IPA 45%).
3. Ringdosimeter tas på innan handdesinfektion.
4. Utför handdesinfektion enligt rutin med ringen på. Var extra noga med ringdosimetern. För ringdosimeter fram och tillbaka och vrid runt den på fingret under 1,5 min, och var särskilt noga med insidan samt ändarna.



OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Region Halland hälso- och sjukvård

Mellan operationer/patienter samt vid arbetsdagens slut:

5. Efter patientkontakt tas ringdosimeter av och desinficeras med DAX Ytdesinfektion Plus (isopropylalkohol IPA 45%).
6. Lägg ringen i en liten sterilpåse som viks i öppningen och försluts med ett gem.
7. Vid nästa ingrepp utför punkt 1–4.



Relaterande styrande dokument

[Persondosimetri](#)

Uppdaterat från föregående version

Förtydligat i dokumenttiteln och i syftet att rutinen gäller för ringdosimeter från Landauer