

Munskydd – Säker användning

Hitta i dokumentet

[Säker användning](#)
[Instruktion för hur du tar på och av ett munskydd på ett säkert sätt](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Säker användning

Det är viktigt att munskydd tas på med nydesinfekterade händer. Munskyddet ska täcka näsa och mun som skydd mot droppsmitta. Det finns ingen exakt tidsangivelse på hur länge ett munskydd kan användas. Munskyddet är en engångsartikel och det ska kasseras om det kontaminerats eller om det börjar bli genomfuktat. Om munskyddet har tagits av från näsa och/eller mun (t ex om det placerats under hakan) ska det inte återanvändas.

Munskydd skall inte vidröras under användning eftersom det riskerar att kontaminera händerna för vidare kontaktsmitta i miljön. Måste munskyddet justeras över näsryggen under användning skall händerna desinfekteras både före och efter justeringen.

Instruktion för hur du tar på och av ett munskydd på ett säkert sätt

Ta på munskydd:

- Desinfektera händerna
- Ta ett munskydd ur förpackningen
- Fäst öronbanden bakom öronen alternativt knyt banden
- Veckla ut munskyddet och forma metallbygel som ska sitta över näsryggen
- Desinfektera händerna

Ta av munskydd:

- Desinfektera händerna
- Ta av munskyddet genom att ta tag i öronbanden bakom öronen, alternativt "knäcka" av knytbanden
- Kasta munskyddet
- Desinfektera händerna

Uppdaterat från föregående version

2024-08-27 Genomgången