

Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av

Hitta i dokumentet

[Exempel på användningsområde för visir:](#)
[Användning av visir](#)
[Instruktion för rengöring och desinfektion av flergångsvisir](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Exempel på användningsområde för visir:

- Som personlig skyddsutrustning vid risk för smitta
- Som barriär för att förhindra smitta från personal till patient

Användning av visir

Vid all användning av visir är det viktigt att användaren inte vidrör visiret med sina händer under användandet. Då kan händerna kontamineras och på så sätt föra eventuell smitta vidare. Skulle visiret vidröras ska händerna desinfekteras direkt.

Visir kan behållas på vid vård och behandling av flera på varandra följande patienter, exempelvis mottagningsbesök eller rond på vårdavdelning förutsatt att visiret inte kontaminerats, skadats eller tagits av. Engångsvisir som kontaminerats eller tagits av kasseras. Flergångsvisir som blivit kontaminerade eller tagits av rengörs enligt instruktionen nedan.

Instruktion för rengöring och desinfektion av flergångsvisir

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel
2. Ta av visiret bakifrån, för att minska risk för kontamination av händerna
3. Lägg visiret på, t ex ett rostfritt rullbord eller desinfekterbar bricka
4. Desinfektera händerna
5. Ta på engångs skyddshandskar
6. Rengör och desinfektera hela visiret med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt, innehållande tensider. Bearbeta mekaniskt skärmen på båda sidorna samt eventuella skalmar. Ytdesinfektera arbetsytan
7. Placera visiret på en ren yta
8. Ta av skyddshandskar
9. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel

Ett rengjort och desinfekterat visir ska förvaras på ett ställe där renheten bevaras. Säkerställ förvaringen.

Uppdaterat från föregående version

2024-08-27 Genomgången