

CT – tryckspruta Ulrich medical CT motion Röntgen Vbg

Hitta i dokumentet

[Förslag på injektionshastighet](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Förslag på injektionshastighet

CVK Spruta 2-3 ml/s och behålla samma prep-grupp (delay) som vid injektion i PVK.

Om CVK:n har flera "portar" så ska du helst använda den bruna eftersom denna har störst lumen (oftast IVA-patienter).

Port-a-cath Se vårdriktlinje [Subkutan venport användande vid CT-undersökningar metodbeskrivning HSV](#)

Uppdaterat från föregående version

2023-06-02: Årlig uppdatering utan ändring.

2021-12-09: Tagit bort information om injektionshastighet för PVK.