

Rem inrättning, klinik, avd/mott	Personnummer och namn
Rem läkare	

Ledvätska



Avd för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Varberg
 Hallands sjukhus Varberg
 432 81 Varberg, tfn 0340-48 14 25

 Avd för Klinisk kemi Kungsbacka
 Hallands sjukhus Kungsbacka
 Sjukstugegatan 16
 434 80 Kungsbacka, tfn 0300-56 51 67

 Avd för Klinisk kemi Halmstad
 Hallands sjukhus Halmstad
 301 85 Halmstad, tfn 035-13 18 00

 Avd för Klinisk kemi Falkenberg
 Box 113, 311 22 Falkenberg,
 tfn 0346-560 82

Provtagning Celler och Kristaller EDTA-rör (K2E), 3 mL, lila propp. Minimimängd 1 mL. Tag om möjligt ett eget rör till varje analys à minst 1 mL. Blanda röret noga. Centrifugeras inte. Ledv-Celler är hållbart i rumstemperatur till påföljande dag. Ledv-Kristaller hållbart 48 timmar i rumstemperatur. Om patienten fått lokal kortisonbehandling i leden ses ibland "pseudokristaller" upp till en månad efter behandling. Detta kan göra att provet inte går att bedöma. Glukos och Laktat Na-Heparin-Fluorid (NaF), 5 mL, grå propp. Minimimängd 1 mL. Blanda röret noga. Centrifugeras inom 15 minuter och avskiljs från bottensats. Datum:..... KI:..... Sign:.....
Analys ☐ Ledv-Celler (Leukocyter, poly- och mononukleära) ☐ Ledv-Kristaller (Pyrofosfat- och uratkristaller) ☐ Ledv-Glukos ☐ Ledv-Laktat } EDTA-rör (K2E), 3 mL lila propp } Na-Heparin-Fluorid (NaF), 5 mL, grå propp