

Rem inrättning, klinik, avd/mott	Personnummer och namn
Rem läkare	

TROMBOSUTREDNING



Provtagning		
Datum: kl:		
Anamnes		
<input type="checkbox"/>	Patienten behandlas med Waran	Läkare sign.
<input type="checkbox"/>	TROMBOSUTREDNING P-Antitrombin, P-APT-tid, P-Lupus antikoagulans, P-PK, P-Protein C, P-Protein S fritt, DNA-Faktor II (Protrombin) genotyp, DNA-Faktor V (Leiden) genotyp. Provtagning: 5 st Na-Citratrör 2,7 mL ljusblå propp + 1 st EDTA-rör 3 mL lila propp. Provhantering: Na-Citratrören centrifugeras i 20 min, 2000 g inom 30 min. Plasma avskiljs i ett stort rör, blandas och fördelas i 5 små plaströr, ca 1 mL/rör. Lämna 1 cm plasma i ursprungsrören för att undvika tillblandning av trombocyter. Varje rör förses med patient-ID och provtagningsdatum. Plasman fryses omedelbart i -20° EDTA-röret centrifugeras ej. Fryses i -20°C.	
ENSTAKA ANALYSER		
<input type="checkbox"/>	P-Lupus antikoagulans Provtagning: 3 st Na-Citratrör 2,7 mL ljusblå propp. Provhantering: Na-Citratrören centrifugeras i 20 min, 2000 g inom 30 min. Plasma avskiljs i ett stort rör, blandas och fördelas i 3 små plaströr, ca 1 mL/rör. Lämna 1 cm plasma i ursprungsrören för att undvika tillblandning av trombocyter. Varje rör förses med patient-ID och provtagningsdatum. Plasman fryses omedelbart i -20°C.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P-Protein C	P-Protein S, fritt	P-Anti faktor Xa Ange typ av läkemedel, dosering samt tid för sista dos
Provtagning: 2 st Na-Citratrör 2,7 mL ljusblå propp per beställd analys. Provhantering: Na-citratrören centrifugeras i 20 min, 2000 g inom 30 min. Plasma avskiljs i ett stort rör, blandas och fördelas i 2 små plaströr/analys, ca 1 mL/rör. Lämna 1 cm plasma i ursprungsrören för att undvika tillblandning av trombocyter. Varje rör förses med patient-ID och provtagningsdatum. Plasman fryses omedelbart i -20°C.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DNA-Faktor II (Protrombin) genotyp	DNA-Faktor V (Leiden) genotyp	
Provtagning: 1 st EDTA-rör 3 mL lila propp. Provhantering: EDTA-röret centrifugeras ej.		

SID-nr (anges av laboratoriet)
