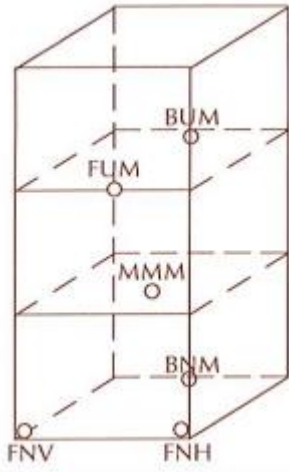


## REMISS

### Kontroll av apparatur för sterilisering

Avsändare (namn och fullständig adress)	Provdatum	Klockslag	
	Prövning av <b>Ångautoklav</b>  Program: ..... Apparatens fabrikat och beteckning		
	Total tid (min)	Ster tid (min)	Ster temp (°C)

Anvisningar för provtagning, se baksidan!

	<i>Var god fyll i Lot nr</i> ↓	LABORATORIETS ANTECKNINGAR Undersökningsresultat
	1. FNV - fram*, nere, vänster Lot nr	
	2. FNH - fram*, nere, höger Lot nr	
	3. FUM - fram*, uppe, mitten Lot nr	
	4. MMM - mitten, mitten, mitten Lot nr	
	5. BNM - bak, nere, mitten Lot nr	
	6. BUM - bak, uppe, mitten Lot nr	
*) - fram betecknar autoklavens inmatningssida		

Plats för labbetikett

## MATERIAL

**Biologisk indikator för ångautoklav.** Består av en plastampull som innehåller en sporlapp preparerad med *Bacillus stearothermophilus*, samt ett odlingsmedium i en glasampull. På plastampullen finns angivet Lot no och utgångsdatum. Förvaras i rumstemperatur.

## KONTROLLFREKVENNS/UTFÖRANDE

### Ångautoklav

I varm autoklav, t ex efter Bowie Dick-test, testas varje autoklav och steriliseringsprogram med biologisk indikator (sporprov-rutinkontroll) tillsammans med normalt gods, minst var tredje månad. Vid varje kontroll är det lämpligt at använda sex biologiska indikatorer som förpackas med godset och fördelas i kammaren. Vid växt i en av indikatorerna, kontrollera processparametrarna (tid, temperatur och tryck) och trycket på inkommande ånga samt inspektera dörrpackningen. Godset behöver inte återkallas. Upprepa därefter provningen.

Om flera indikatorer visar växt eller växt uppträder vid omprövning får autoklaven/sterilisatorn ej användas för sterilisering. Frisläppt gods från och med den process, där positiva sporprover uppträdde, ska spåras och återkallas. Orsaken ska utredas och ny revalidering göras innan sterilisatorn får tas i bruk.

Sporprovets placering framgår av remissens framsida:

- Plastampullerna får inte öppnas.
- Märk sporpaketet genom att ange placering enligt löpande nummer (sprit- eller tuschpenna är tillåtet).
- Fyll i Lot no på remissens framsida.
- Sänd remiss och prov till Mikrobiologi Halland. Plastampuller som transporteras externt förpackas enligt "Regler för transport av diagnostiska prover".