

Covid-19 – Användning, rengöring och desinfektion av visir för flergångsbruk

Exempel på användningsområde för visir:

- Som personlig skyddsutrustning vid risk för smitta
- Som barriär för att förhindra smitta från personal till patient

Vid all användning av visir är det viktigt att användaren inte vidrör visiret med sin händer under användandet. Detta riskerar att kontaminera händerna och på så sätt föra eventuell smitta vidare. Skulle visiret vidröras ska händerna desinfekteras direkt.

Visir som tagits av och ska återanvändas ska rengöras och desinfekteras direkt. Instruktion för rengöring och desinfektion av visir, se nedan.

Ett rengjort och desinfekterat visir ska förvaras på ett ställe där renheten bevaras. Säkerställ förvaringen.

Återanvändning av visir för flergångsbruk

Visir avsedda för flergångsbruk, som ska återanvändas, rengörs och desinfekteras direkt, när de tas av efter användning, enligt nedanstående instruktion. Visir för engångsbruk ska inte återanvändas.

Instruktion för rengöring och desinfektion av visir

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel
2. Ta av visiret bakifrån, för att minska risk för kontamination av händerna
3. Lägg visiret på, t ex ett rostfritt rullbord eller desinfekterbar bricka
4. Desinfektera händerna
5. Ta på engångs skyddshandskar
6. Rengör och desinfektera hela visiret med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt, innehållande tensider. Bearbeta mekaniskt skärmen på båda sidorna samt eventuella skalmar. Ytdesinfektera arbetsytan
7. Placera visiret på en ren yta
8. Ta av skyddshandskar
9. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel