

Använd munskydd på ett säkert sätt

Ta på munskydd:



1. Desinfektera händerna



2. Ta tag i öronbanden på munskyddet och fäst bakom öronen eller knyt banden



3. Forma metallbygeln över näsryggen



4. Veckla ut munskyddet från näsryggen över mun och haka



5. Undvik att röra vid munskyddet under användning


Ta av munskydd:



1. Desinfektera händerna



2. Ta tag i öronbanden och tag av munskyddet utan att vidröra dess framsida

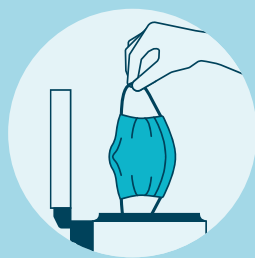

3. Kasta munskyddet. Det ska inte återanvändas



4. Desinfektera händerna

Rätt och fel:

