

Rätt pinne för rätt analys

Tyvärr kan företagen inte leverera tillräckligt med provtagningsset för våra analyser. Därför är det viktigt att våra provtagningsset används smart.

Vårt egenproducerade provtagningsset, där 50 st. provrör och provtagningspinnar ligger i en kartong (se bild 1), ska användas för PCR-analysen för SARS-CoV-2 (covid-19). Dessa provtagningsset fungerar inte för bakterieodling i och med att en del bakterier dör relativt snabbt i den transportvätskan.

För bakterieodling ska E-swab användas (se bild 2) som innehåller ett medium som håller bakterier levande. I och med att det är leveranssvårigheter med detta provtagningsset, ska det helst bara användas för bakterieodling, inte för PCR.

För att få en bra överblick över provtagningsmaterialet som finns tillgängligt just nu och hur det helst ska användas, se denna tabell:

Indikation	1:a val	2:a val
Nasofarynxprov för direktpåvisning av SARS-CoV-2 (PCR)	Egenproducerade provtagningsset (bild 1)  Art nr webbesam: 608283	E-swab (bild 2)  Art nr webbesam: 53871
Svalg-/näsa-/salivprov för direktpåvisning av SARS-CoV-2 (PCR)	Egenproducerade provtagningsset (bild 1) (kommer att produceras om E-swab inte kan levereras i tillräcklig mängd)	E-swab  Art nr webbesam: 22551
Nasofarynxprov för bakterieodling	E-swab	Det finns inga alternativ för E-swab
Svalgprov för bakterieodling	E-swab	Det finns inga alternativ för E-swab