

# Så använder du munskydd på ett säkert sätt

## Ta på munskydd:



1. Desinfektera händerna



2. Ta tag i öronbanden på munskyddet och fäst bakom öronen eller knyt banden



3. Forma metallbygeln över näsryggen



4. Veckla ut munskyddet från näsryggen över mun och haka



5. Undvik att röra vid munskyddet under användning

## Ta av munskydd:



1. Desinfektera händerna



2. Ta tag i öronbanden och tag av munskyddet utan att vidröra dess framsida



3. Kasta munskyddet. Det ska inte återanvändas



4. Desinfektera händerna

## Rätt och fel:

