

BRUKSANVISNING - KORT VERSION


GRIPPER PLUS® och GRIPPER PLUS® POWER Infusionsnål med nålskydd

Så här enkelt är det

1 Anslut och lösgör nålens grepp

Rengör insticksstället enligt sjukhusets rutiner.

Anslut GRIPPER PLUS® till porten och ta sedan bort nålens grepp.

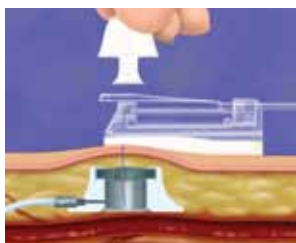

2 Avlägsna nålen från porten


Greppa bakre delen av GRIPPER PLUS® genom att: Placera två fingrar på nålplattan för att stabilisera nålen. Placera ett av den andra handens fingrar på spetsen av säkerhetsarmen.



3 Lyft upp säkerhetsarmen

Lyft säkerhetsarmen rakt upp.


Lägg märke till att nålen kommer ut helt rak.

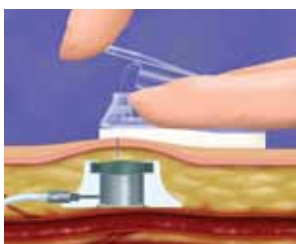

4 "Klicka" nålen till låst position

Fortsätt att lyfta upp tills nålen "klickar" fast i låst position.

GRIPPER PLUS® kan nu kasseras i en behållare för stickande/skärande avfall.

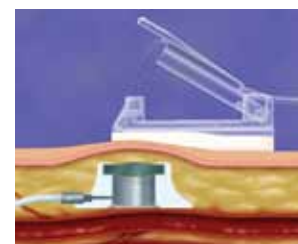

Säker nålapplicering och...

säkert avlägsnande

Observera att denna information inte ersätter någon IFU. Vänligen läs IFU för fullständig information.

Smiths Medical Sverige AB
Box 1143, 164 22 Kista
Tlf. 08 - 594 772 50
Fax.08 - 594 772 69
info.sweden@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

smiths medical