



Guide för sjukhusgemensamt förråd Matematen Halmstad

Det sjukhusgemensamma förrådet Matematen ska tillhandahålla de förband som används mer sällan, t ex specialförband för infekterade, svåriläkta och komplicerade sår samt trakealprodukter och produkter för PICC-Line. Sortimentet i Matematen skall inte ersätta grundsortimentet på respektive avdelning.

Matematen finns belägen på plan 1, i korridoren mot personalmatsalen i korsningen mot röntgen.

Du har access till rummet via ditt SITH:s kort. Vid uttag av förband från Matematen ska du registrera vad du hämtat, vilken storlek, antal, samt vilken avdelning. Detta är viktigt för statistik och kostnadsfördelning.

Regionservice sköter inventering och påfyllning.

Ansvarig: Ulla-Bella Wilhelmsson-Rasmussen

ulla-bella.wilhelmsson-rasmussen@regionhalland.se

Ansvarig för sortimentet; Kristina Dimfelt Elmgren [kristina.dimfelt-](mailto:kristina.dimfelt-elmgren@regionhalland.se)

elmgren@regionhalland.se och Anette Olsson anette.m.olsson@regionhalland.se

Register

<i>Sidnummer</i>	<i>Produkt</i>
3	Val av förband
4	Sårbäddsskydd
4	Hudskydd
4 - 5	Polyuretanskumförband
6	Kombinationsförband
6	Bakterieadsorberande- och svampbindande förband
6	Kolförband
7	Jodkompress
7-8	Silverförband
8	Silverförband gelbildande
8	Ärrbehandlingsförband
8	Superabsorberande förband
9	Op-förband
9	Sårfilm
9	Sårrengöring
10	Hälavlastning
10	Kompression
10	Maggördel
10	Tubvantar
11-12	Undertrycksbehandling
13	Trakealprodukter
14	PICC-Line
14	Dränagepåse
14	Fekalkatetersystem

Val av förband

Patienter med sår finns inom alla sektorer av hälso- och sjukvård. Sår ger lidande, och skapar stora kostnader för samhället. En aktiv sårbehandling kan lindra lidande och förkorta läkningstiden avsevärt.

Förband väljs efter sårets läknings stadium. Samma förbandstyp passar sällan genom hela läkningsprocessen.


Sårläkningsfas	Sårets utseende	Förbandsval
Förstadium till sår	Kvarstående rodnad	Avlasta, skydda mot friktion och skjuv med tunn hydrokolloidplatta eller sårfilm.
Inflammationsfas	Svart eller gul nekros, fibrinbelagd sårbotten, smetigt, vätskande	Hydrogel, täck med hydrokolloidplatta eller sårfilm. Polyuretanskumförband Hydrofiberförband vid rikligt vätskning Jobpreparat
Nybildningsfas	Rent, rött, granulerat	Polyuretanskumförband, hydrokolloidplatta Fyll eventuellt sårhålan med pasta eller gel till 2/3. Ej vidhäftande kompress
Mognadsfas	Epitelialiserat, läkt	Hudskydd i forma av tunn hydrokolloidplatta el. sårfilm

Skydda huden runt såret mot bl a fukt med t ex. Cavilon.

Sårbäddsskydd

Egenskaper Skyddar sårytan vid täta förbandsbyten. Sårsekret kan passera till täckförbandet.




Användning Mindre brännskador, hudtransplantat, tagställen och traumatiska sår.

Produkt	Produktbeskrivning	Storlek	Leverantör och artikelnummer	Bild
Sipro	Sårbäddsskydd med silikon	10x18 cm	Vitri Medical 804003	

Hudskydd

Egenskaper Servetterna erbjuder både rengöring, återfuktning och skydd av huden.


Användning Cavilon ger ett hållbart och långvarigt skydd mot kroppsvätskor och fuktar huden

Cavilon	Advanced Skin Protectant	2,7 ml	3M 5050G	
Cavilon	Hudbarriärkräm	28 g	3391G	
Cavilon	Barriärtvättlapp		9274	



Polyuretanskumförband








Polyuretanskumförband absorberar vätska och håller den kvar i förbandet, vilket minskar risken för uppluckring av omkringliggande hud men behåller fukten i såret. Förbandet passar för lätt till måttligt och i vissa fall rikligt vätskande sår och kan kombineras med hydrogeler. Olika polyuretanskumförband har olika absorptionsförmåga. En del polyuretanskumförband innehåller skonsamma antiseptiska medel. Polyuretanskumförband med silikonnya minskar smärta vid förbandsbyten.

Svagt häftande förband med silikonnya

Cutimed Siltec Plus		10x10 cm	73288-00001	
		10x20 cm	73288-00002	

Icke häftande förband


Allevyn Non Adhesiv	Icke häftande Kan klippas	10x20 cm	66007335	
		20x20 cm	66007638	
Mepilex Lite	Absorberande silikon förband med safetac. Utan kant	10x10 cm	284100	
		20x50 cm	284500	

Häftande superabsorberande förband med kant				
Mepilex Border Flex	Flexibelt polyuretan m superabsorbenter, Safetac, mjuk silikon, för måttligt till rikligt vätskande sår	10x20 cm	Mölnlycke HealthCare 595800	
		10x30 cm	595900	
		12,5x12,5 cm	595000	
Självhäftande silikonförband utan kant				
Mepilex transfer	Självhäftande, silikon, tunt, absorberande utan kant m safetac, transfererar vätska	10x12 cm	Mölnlycke HealthCare 294700	
		15x20 cm	294800	
		20x50 cm	294502	
Mepilex XT	Självhäftande, silikon, safetac, utan kant, absorberande	10x10 cm	211100	
		20x20 cm	211400	
Mepilex Border Sacrum	Självhäftande Superabsorberande Safetac för sacrum	16x20 cm	282050	
Mepilex Border Häl	Självhäftande Superabsorberande Safetac för Häl	22x23 cm	282750	
Självhäftande silikonförband med kant				
Allevyn Life	Häftande förband med silikongel Anatomiskt format	15,4x15,4 cm	Smith&Nephew 66801069	
		21x21 cm	66801070	
Mepilex Border Lite	Självhäftande silikon, allt-i-ett förband med safetac	4x5 cm	281000	
		5x12 cm	281100	
		10x10 cm	281300	

Kombinationsförband

Egenskaper Häftande, transparent och absorberande förband som ger möjlighet att inspektera sår, sårsekret och huden runt såret utan att lyfta på förbandet. Ska inte klippas. Förbandet är duschbart.





Användning Som primärförband vid lätt till måttligt vätskande sår, som trycksår grad 2-3, tagställen, brännskador samt ytliga traumasår och hudflikar. Som sekundärförband över andra förband, t ex alginat. Den absorberande delen av förbandet bör gå 1 cm utanför sårkanten.

Aquacel foam S	Inte häftande	10x10 cm	Conva Tec 420633	
		20x20 cm	420636	
		15x20 cm	420637	

Bakterieadsorberande och svampbindande förband


Egenskaper Sorbact bygger på principen "hydrofob interaktion", d v s att två hydrofoba (vattenavstötande) ytor binds till varandra vid direkt kontakt och med hjälp av den omgivande vätskan. De flesta patogena bakterier har en hydrofob cellyta, grampositiva såväl som gramnegativa bakterier, samt jästsvamp (candia albicans).

Användning Som infektionsprofylax till rena, vätskande sår och vid misstanke om kolonisering. Sorbacts gröna, hydrofoba yta måste ligga i direkt kontakt med sårytan för att bakterier och svampar ska kunna bindas till produkten. Feta produkter, t ex salvor, förtar den hydrofoba effekten och ska inte användas med Sorbact.

Sorbact	Kompress av acetat- och bomullsväv	7x9 cm	Abigo Medical 98125	
Sorbact	Absorptionsförband För måttligt till rikligt vätskande sår	10x10 cm	98222	
Sorbact	Tamponad	2x50 cm	98121	
Sorbact	Kirurgiskt förband skyddar rena sår, vattenavstötande	10x20 cm	98143	
		10x30 cm	98145	

Kolförband

Absorberande kolförband till illaluktande sår som kan användas som primärförband vid ytliga sår eller som täckförband över sårutfyllare/kavitetsförband.


Carboflex S	Gelbildande förband med kol	15x20 cm	ConvaTec 868299	
-------------	-----------------------------	----------	--------------------	---

Jodkompress

Egenskaper Upprensande och antimikrobiell effekt samt reducerar dålig lukt.

Användning Orena, vätskande sår och infekterade sår. Kompressen klippas i sårets storlek (kompressväven kan tas bort om så önskas). Täck med torr kompress.

Försiktighet vid tyroidea anamnes.

Iodosorb	Jodstärkelse blandning mellan två lager polyesterväv	6x8 cm	Smith&Nephew 66001292	
----------	---	--------	--------------------------	---

Silverförband

Indikationsområdena för silverförband kan vara;

- svårläkta sår där misstanke finns om bakteriell pålagring som genes/bidragande orsak,
- vid hög infektionsrisk, t ex sår hos immunosupprimerad patient, vid exposition av djupa vävnadsstrukturer m m,
- sår hos patient med tidigare känd, återkommande infektionsproblematik,
- utbredda brännskador.


Silverbehandling av svårläkta sår

Lokal silverbehandling kan övervägas på svårläkta vätskande sår med infektionstecken eller sår med fördröjd läkning med hög/återkommande infektionsrisk. Silver är inget alternativ till antibiotika vid behandling av djup eller systemisk infektion. Behandlingstiden ska hållas kort. Efter 2-4 veckor bör effekten av behandlingen utvärderas och indikationen omvärderas innan den eventuellt förlängs. Behandlingen bör ordinerars av läkare eller i samarbete med specialistmottagning.

Silverförband tunt

Egenskaper Frisläpper silverjoner kontinuerligt och ger en hög silverjonkoncentration både i sårbedden och i förbandet.


Användning Valfri sida mot såret. Kan klippas vid behov. Täck med ytterförband som kan hantera överflödigt vätska samt skapa fuktig sårmiljö


Silverlon Flex	Nonwoven kompress omgiven av polyetylenät med no	5x5 cm	WCD-NPS-flx- 22	
-------------------	---	--------	--------------------	---

Silverförband polyuretanskum

Egenskaper Ett antibakteriellt förband med god absorptionskapacitet. Kan kombineras med kompressionsbandage. Brännskador.

Användning Välj en storlek som går minst 2 cm utanför sårkanten. Kan klippas vid behov.

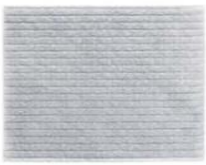

Mepilex AG	Täckt med semipermeabel polyuretanfilm på ena sidan och mjuk silikon på den andra	15x15 cm	Mölnlycke Health Care 287310	
		10x20 cm	287210	
		20x50 cm	287510	

Mepilex Border AG	Täckt med semipermeabel polyuretanfilm på ena sidan och mjuk silikon på den andra med häftande kant	10x10 cm	395300	
		10x20 cm	395800	
		15x15 cm	395400	

Silverförband gelbildande


Egenskaper Hög absorptionsförmåga. Bildar en gel som skapar fuktig sårhelingsmiljö.

Användning Applicera AQUACEL Ag med minst 1 cm marginal utanför sårkanten. Vid djupa sår, täck sårytan med AQUACEL Ag och fyll sedan sårhålan till 80 % med AQUACEL eller annan absorberande kompress. Lämna en bit av förbandet utanför såret för att underlätta avlägsnandet. Välj täckförband efter hur mycket såret vätskar.

Aquacel AG+ Extra	Hydrofiber förband	15x15 cm	ConvaTec 413568	
Aquacel AG+ Extra	Tamponad	2x45 cm	413571	

Ärrbehandlingsförband


Hudfärgat tunt förband för behandling av hypertrofiska ärr. Även som profylaktisk behandling.

Mepiform	Safetac	4x30 cm	Mölnlycke Health Care 293100	
----------	---------	---------	------------------------------------	---

Superabsorberande förband

Egenskaper: Maximal absorptionskapacitet, håller kvar vätska i förbandet och förebygger maceration. Semipermeabel film hindrar läckage men tillåter gasutbyte. Vätskan sprids jämnt i förbandet, reducerar dålig lukt.


Användning: Till kraftigt vätskande sår, förbandet kan ligga på i upp till 7 dagar. Används med fördel under kompression. Fästs med lämpligt ytterförband.

Cutimed Sorbion Sachet	Förband med spärrskikt utan häftande kant	10x20 cm	BSN 73232-00009	
		20x30 cm	73232-00018	

OP-förband

Egenskaper: Skyddar såret mot yttre kontamination, är vattentätt och har hög absorptionskapacitet. Fastnar inte i såret och är tunt och smidigt


Användning: Op-sår, skrapsår, rivsår och skärsår.

Opsite Post OP Visible	Filmförband med häftande kant	10x15 cm	Smith&Nephew 66800137	
		10x20 cm	66800138	
		10x30 cm	66800140	

Sårfilm

Egenskaper: Skonsamt förband som andas och skyddar huden. Transparent för enklare inspektion av såret.

Användning: Kan användas i kombination med andra förband på ytliga sår.


Mepitel film	För känslig hud. Polyuretanfilm, safetac	10x25 cm	Mölnlycke Health Care 296470	
-----------------	--	-------------	------------------------------------	---

Sårrengöring

Sårrengöringsdyna

Egenskaper: Stickad enkelfibrig polyestertråd. Baksida av polyakrylat.


Användning: Används fuktig för mekanisk debridering av såryta och kringliggande hud

Debrisof t	Dyna för rengöring av sår	10x10 cm	Lohmann&Rauscher AB 31222	
---------------	------------------------------	-------------	---------------------------------	---

Spolvätska

Egenskaper: Spolvätska med polyhexanid (PHMB) och Betain


Användning: Låt en Pronotosan-dränkt kompress ligga på/i såret i 10-15 minuter

Prontosan Spolvätska	0,1% PHMB, 0,1% Betain	40 ml	B.Braun Medical AB 400484	
-------------------------	---------------------------	-------	------------------------------	---

Hälavlastning

Egenskaper: Ett hälskydd utformat av ortopedier med syfte att förebygga och behandla trycksår på hälen. Tillverkad av mjukt och fast polyuretanskum.

Användning: Elimineras effektivt trycket mot hälen genom att hälen höjs upp från omgivande tryck, vilket ger snabbare läkning. Till patienter med t ex diabetes, svårålkta sår och risk för trycksår.


Heelift Glide Original	Polyuretanskum Latexfri Friktionsfri baksida i trikå	One size	Etac Sverige AB DADM-HLG	
------------------------------	---	----------	--------------------------------	---

Kompression

Kompression 2-lagers

Egenskaper: De två lindorna fäster i varandra vilket minskar risken för att de ska glida ned samt bildar ett tunt och lätt kompressionsbandage som kan bäras upp till 7 dagar


Användning: För att uppnå terapeutisk kompression vid behandling av venösa bensår. Coban 2-lagerskompressionssystem är lämpligt att använda på patienter med ett ABPI > 0,8.

Coban 2	2-lagers lindor Komfortlager i polyuretanlaminat. Latexfri Tunn	10cmx10m	3M Svenska AB 2094	
---------	--	----------	--------------------------	---

Kompression Lite 2-lagers


Egenskaper: Vilotrycket är reducerat med 25%. Bibehållen kompression i 7 dagar.

Användning: Coban Lite 2-lagers kompressionssystem är lämpligt att användas på patienter med nedsatt tolerans för kompression. Coban Lite 2-lagerskompressionssystem är lämplig att använda på patienter med ett ABPI > 0,5.

Coban 2 Lite	2-lagers lindor Komfortlager i polyuretanlaminat. Latexfri tunn	10cmx10m	3M Svenska AB 2794E	
-----------------	--	----------	---------------------------	---


Maggördel

Egenskaper: Ger bekvämt och effektivt stöd/kompression över bälten.

Figur	Elastisk gördel.	Medium	Nordicare Ortopedi&Rehab 502020950	
		Large	502020960	
		X-Large	502020970	

Tubvantar







Egenskaper: Ger bekvämt och effektivt stöd/kompression över bälten.

Tubifast	Skonsamma kläder Vantar för barn. Tubifastgarments	Barn S	Mölnlycke HC 5923	
	Vantar för vuxna	M/L	5920	

Undertrycksbehandling

Egenskaper: Det integrerade V.A.C. Therapy-systemet främjar sårhäkningsprocessen genom att behandla sår med negativt tryck (Negative Pressure Wound Therapy – NPWT). Att applicera negativt tryck i sårområdet hjälper till att dra samman sårkanterna, få bort infektiöst material och aktivt främja bildningen av granulationsvävnad.


Användning: Indicerat för patienter med kroniska, akuta, traumatiska, subakuta och rupturerade sår, delhudsbrännskador, långsamläkande sår (exempelvis diabetes- och trycksår eller venös insufficiens), lambåer och transplanterat.

ActiV.A.C	Canister med gel Engångs	300 ml	KCI Medical M8275058	
V.A.C Whitefoam Dressing	Polyvinylalkohol Svampförband för smärtsamma och ytliga sår.	Litet förband 10x 7,5 cm	M6275033	
SENSA T.R.A.C	Slang, klämma och koppling		M8275057	
V.A.C Gauze NPWT Dressing kit	1x Kerlix AMD rule 11x374mm 2xV.A.C sårfilm 1x eng.linjal 1x Sensa T.R.A.C Pad	Engångs omläggnings- set	413716	
V.A.C Simplace EX Medium Dressing Kit	2x spiralformat svart polyuretan 2xV.A.C sårfilm 1 x eng.linjal 1xSensa T.R.A.C Pad	Engångs omläggnings- set Medium	M8275045	
V.A.C Drape	Självhäftande sårfilm	30,5x26 cm	M6275009	

Undertrycksbehandling PICO


Egenskaper: PICO består av en liten bärbar pump som kan användas i upp till 7 dagar. PICO pumpen genererar effektivt negativt tryck på -80mmHg men är ändå tillräckligt liten för att diskret få plats i fickan². PICO pumpen är kopplad till ett speciellt utformat förband som ger negativt tryck över hela sårbedden och tar bort exsudat från sårbedden genom absorption och avdunstning.













Användning: PICO är utformad för att ge en veckas behandling (7 dagar). Välj den förbandsstorlek som, när den appliceras, täcker såret eller hela snittet och samtidigt håller portanslutningen borta från sårområdet.

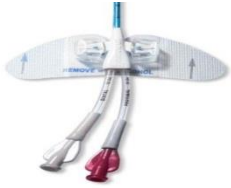


	Avser såryta för	Förbandets mått	Smith&Nephew	
Pico förbandskit	5x10 cm	10x20 cm	66801358	
	5x20 cm	10x30 cm	66801359	
	5x30 cm	10x40 cm	66801360	
	10x10 cm	15x15 cm	66801361	
	10x15 cm	15x20 cm	66801362	
	10x25 cm	15x30 cm	66801363	
	15x15 cm	20x20 cm	66801364	
	20x20 cm	25x25 cm	66801365	

Undertrycksbehandling PICO Multisite

Egenskaper: Multisite är en utökning av de nuvarande PICO storlekarna. Detta förband tillåter enklare applicering på t ex hälar, armbågar, sakrum och armhåla. Även detta förband är utformat för en veckas behandling (7 dagar).

Pico Multisite	Litet kit (Pump, batteri, två Multisite förband, fixation strips, användar manual)	121 cm ²	Smith&Nephew 66801356	
Pico Multisite	Stort kit (Pump, batteri, två Multisite förband, fixation strips, användar manual)	246 cm ²	66801357	

Trakealprodukter				
Nackband	För trakealkanyl	Vuxen	IM-MEDICO 400005033V	
Sugslang	K/N	2,1 m	Mediq E1320210083US B	
Sugkateter	Rak	12 Ch	Mediplast 60881225	
Metalline Trakeal kompress	Ej vidhäftande. Av mjuk nonwoven m aluminiumånga de fiber	8x9 cm	Lohmann&Raus cher 23094	
PolyMem Trakeal kompress	Polyuretan Upprensande	9x9 cm	PartnerMed 5335	
Kompress	Non-woven 4- layers	7,5x7,5 cm	AST Medical 2228112	
Talventil O ²	Med syrgasnippel		Smiths Medical 710R	
Fuktvärme växlare	För trakealkanyl. (Näsa)		Mediq HU41312	
T-stycke		Vuxen	Dolema AG-AS3010	
Kopplings slang	Superset	22F-22M/15F	Intersurgical 3504000	
Trakealkanyl er	Utan kuff		Smiths Medical	
	Utan innerkanyl	Nr 6	60A160	
	Med innerkanyl	Nr 7	60A170	
	Med innerkanyl	Nr 8	60A180	
	Med innerkanyl	Nr 9	60A190	
Trakealkanyl er	Med kuff	Nr 6	670160	
	Utan innerkanyl	Nr 7	670170	
	Med innerkanyl	Nr 8	670180	
	Med innerkanyl	Nr 9	670190	
Innerkanyler	Bivona	Nr 7	BRC270	
		Nr 8	BRC280	
		Nr 9	BRC290	

PICC-Line				
Statlock PICC Plus Stabilisation Device	Fixering avsett för katetrar m suturvingar, ex PICC-Line och CVK.		Bard Norden PIC0220CE	
Inj/Inf membran 1-vägs u slang	Utan Backventil Bionector		Wygon 896.03	
Dränagepåse				
Egenskaper: Utvecklad för dränage och fistelbandagering. Har backventil som förhindrar sekretionen att rinna tillbaka. Transparent material, enkelt att inspektera och den är PVC-fri. Kan kopplas till "nattpåsar" utan speciell konnektor.				
Dränagepåse Midi	Osteril 1-dels Volymindikator Klippguide	300 ml	Coloplast AB 022450	
Fekalkatetersystem				
Protect	Mjukt kateterset, spruta, upps, påsar m filter, klämma		Convatec 421630	