

## Uppfällbar bägare för urinprov

Det finns en utfällbar urinbägare som kan underlätta för patienter som ska ta urinprov i hemmet. Provet hålls sedan över i provtagningsrör. Vid användning säkerställs att patienter inte använder andra orena kärl som kan resultera i osäkra analysresultat.



Utfällbar urinbägare i papp, Platt, safe2Pcanter  
Webbesam 618009  
Nordic Biolabs PCAN01

Utfällbar urinbägare i papp, Platt, safe2Pcanter. **Best nr webSesam: 618009.**

Behållaren är platt och kan vid behov skickas till patienten i ett kuvert med posten. Patienten fäller ut behållaren i hemmet.

### Instruktion



Tryck ut behållaren



Fyll med urin



Häll i provtagningsröret

- Tryck ut behållaren med fingrarna på de vita prickarna. (Peta inte i behållaren med andra handen).
- Behållaren är klar att använda för urinprovtagning. (Se övrig instruktion).
- Häll över urin i provtagningsröret.
- Resterande urin hålls i toaletten. Behållaren kastas i brännbara hushållssopor.

För patientinformation se, [Blanketter Patientinformation – Vårdgivare](#).